


TRUESONIC

Inteligentní ultrazvukový domácí čistič zubů
pro psy

Uživatelská příručka

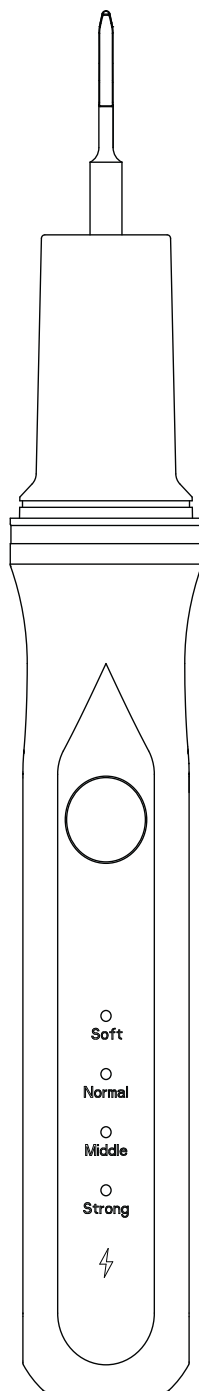

Děkujeme za výběr a důvěru

Představení produktu

Zdraví začíná u zubů. Děkujeme, že jste si vybrali náš inteligentní ultrazvukový čistič zubů Truesonic. Je speciálně navržen pro domácí použití. Truesonic má stabilní výkon s řadou funkcí. Účinně odstraňuje zubní plak, zubní kámen, skvrny ze zubů. Obsluha je jednoduchá, pohodlná, rychlá a efektivní.

Důležité bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento návod A UCHOVEJTE JEJ PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.
- Při použití vždy přiložte špičku na povrch zubu. Vyvarujte se zbytečného kontaktu špičky s měkkými tkáněmi, jako jsou dásně, sliznice nebo kůže.
- Vibrace ucítíte až při kontaktu se zubem. Při kontaktu s dásní se čistič automaticky vypne.
- Špička se během čištění nesmí dotýkat keramické protézy, plomby ani jakékoliv výplně zubu. Mohlo by dojít k poškození špičky. Nepoužívejte přístroj jinou metodou, než je popsána v tomto návodu.
- Kovová hlavice čističe zubů je vyměnitelná.
- Udržujte čistič zubů v dostatečné vzdálenosti od očí.
- V případě poruchy, prosím přestaňte používat.
- Tento výrobek není hračka. Nenechte ho používat své děti.
- Zakázáno pacientům s kardiostimulátorem.
- Pacienti s onemocněním srdce, těhotné ženy a děti by měli být opatrní.
- Nevystavujte výrobek přímému slunečnímu záření, měl by být skladován v 10° až 40°C ve vnitřním prostředí.
- Výrobek sami nerozebírejte.
- Nepoužívejte výrobek během nabíjení.
- V případě problémů s kvalitou produktu kontaktujte zákaznický servis obchodu, kde jste tento produkt zakoupili.

Princip fungování produktu

Tento čistič pracuje na principu, který převádí elektrickou energii na energii ultrazvukových vibrací. Stisknutím tlačítka napájení zapnete zařízení, upravte výkon pomocí tlačítek režimů a začněte čistit požadovaná místa na zubech. Vysoké vibrace slouží k rozdrčení zubního kamene, odstranění odolných zubních skvrn a uvolnění zubního kamene.


Záležitosti vyžadující pozornost

1. Pokud má váš pes onemocnění paradontu, poraďte se před použitím s veterinářem.
2. Může dojít ke krvácení i v případě zdravé dásně.
3. Pokud krvácení z dásní přetrvává, což může být způsobeno defekty dásní, jako je periodontální onemocnění, přerušete používání a poraďte se s veterinářem.
4. V procesu čištění zubů nezůstávejte pracovním hrotem dlouho na povrchu zubů.
5. Po spuštění přístroje není slyšet žádný zvuk hrotu. Zvuk ultrazvuku uslyšíte až při kontaktu se zubem.
6. Nenamáčejte do vody nebo kapaliny.
7. Před a po použití udržujte stroj čistý.
8. Pracovní hrot musí být při použití utažen.
9. Neohýbejte ani neobrušujte pracovní hrot.
10. Neklepejte ani neškrábejte do rukojeti.
11. Po použití stroj osušte a uchovávejte jej v suchém a chladném prostředí.
12. Během používání zařízení netahejte za napájecí kabel, aby nedošlo k oddělení rukojeti od stroje.

Čištění a údržba

1. Nevkládejte ani nepouštějte výrobek do jiných kapalin ani do nich.
2. Se zařízením je třeba zacházet opatrně a skladovat jej na suchém místě.
3. Nemíchejte s toxickými, žíravými, hořlavými a výbušnými materiály.
4. Umyjte kovovou hlavici pod čistou tekoucí vodou.
5. Otřete tělo čističe zubů.

Popis produktu

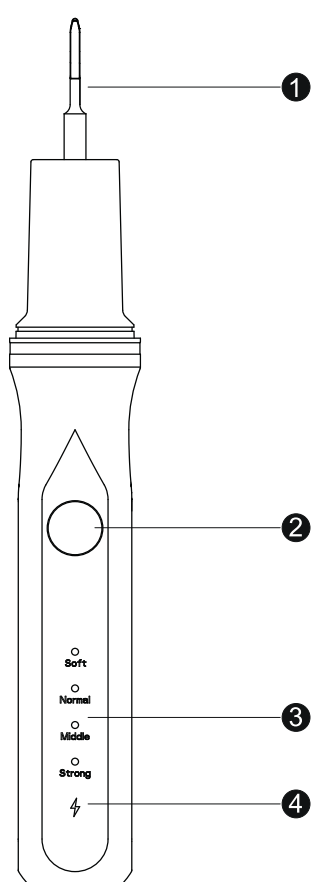


1. Čisticí kovová hlavice
2. Tlačítko ON/OFF
3. 4stupňový režim
4. Zobrazení stavu nabíjení
5. Montážní nářadí




Používání

1. Před použitím se ujistěte, že je čistič plně nabitý. Úplné nabití trvá přibližně 2 hodiny.
2. Pokud nabíjíte čistič zubů poprvé nebo jste jej delší dobu nepoužívali (déle než 3 měsíce), může úplné nabití vyžadovat více času.
3. Vyberte vhodný hrot a nainstalujte jej ve směru hodinových ručiček. **NEPOUŽÍVEJTE** silné otáčení, aby nedošlo k poškození.
4. Stiskněte tlačítko pro spuštění přístroje ON a zapněte režim SOFT pro normální čištění. Rozsvítí se kontrolka režimu spuštění a LED světlo na předním konci rukojeti, což znamená, že přístroj běží.
5. Strana konce špičky se umístí na zub tak, aby byl pohyb špičky rovnoběžný s povrchem zubu.
6. Těžko odstranitelný zubní kámen však může vyžadovat vyšší nastavení výkonu v režimu COMFORT a STRONG.
7. Ujistěte se, že během čištění udržujete kontakt špičky s povrchem zubu. Špičkou stále pomalu pohybujte tam a zpět a nechte práci na přístroji. Používejte krátké a dlouhé tahy, aby se celý povrch každého zubu vyčistil.
8. Nikdy nesetrvávejte na jednom místě déle než 5s, aby nedošlo k zahřátí ošetřovaného místa.
9. Pozor: Při čištění zubů nevyvíjejte velkou sílu na jednom místě!
10. Přístroj je náchylný na poškození vnitřních a vnějších součástí způsobených pádem či nesprávným zacházením.
11. Detekce nízkého napětí. Alarm bliká když je napětí baterie nižší než 3V.
12. Po použití dlouze stiskněte tlačítko OFF a vypněte napájení. Zařízení má přednastavenou funkci automatického vypnutí po 10 minutách, aby se zabránilo ochraně proti přehřátí.

Hroty

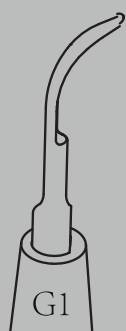


Hrot 1 špičatý - používá se k odstranění zubního kamene a mezizubní čištění.

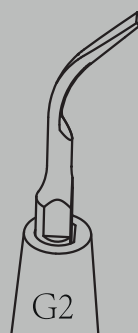

Hrot 2 plochý - slouží k odstranění velkých zubních kamenů a pigmentace.

Používání

1.

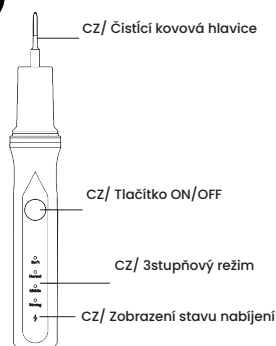


CZ/ Příklad zapnutí dlouhým stisknutím tlačítka ON. Po zapnutí se kontrolka rozsvítí zeleně.

2.




CZ/ Příklad je zcela bezpečný. **Funguje pouze při dotyku se zubem.** Při dotyku měkkých tkání (dásní) se sám vypne.

3.

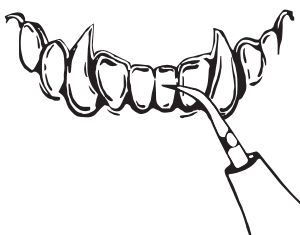

CZ/ Začněte s odstraňováním zubního kamene. Kovový hrot se umístí na zub tak, aby byl pohyb hrotu rovnoběžný s povrchem zubu.

4.

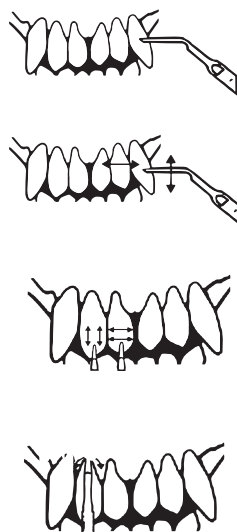


CZ/ Hrotem stále pomalu pohybujte tam a zpět a nechte práci na přístroji. Používejte krátké a dlouhé tahy, aby se celý povrch každého zubu vyčistil. Nikdy nesetrvávejte na jednom místě déle než 5s, aby nedošlo k zahřátí ošetřovaného místa. Psí tesáky by měly být vždy navlhčené (možno použít např. navlhčený odličovací tamponek).

Upozornění: Funguje pouze při dotyku se zubem.


Výměna pracovního hrotu




Pokud je spojení uvolněné, vibrace nelze přenášet správně. Použijte instalační klíč a ujistěte se, že pracovní hrot je připojen pevně. K rozebrání nepoužívejte jiné nástroje. Můžete způsobit poruchu nebo poškození.

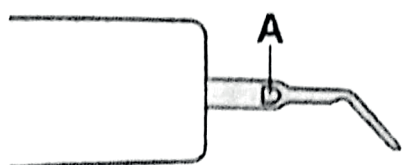


Potvrďte pozici A

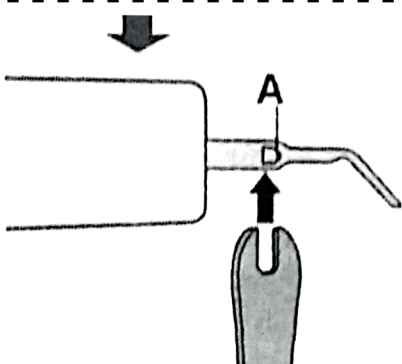

Vložte klíč do polohy A

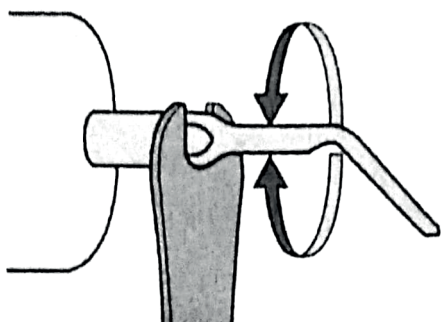

Otočte hlavu proti směru hodinových ručiček pomocí klíče k oddělení pracovního hrotu a dokončete demontáž.

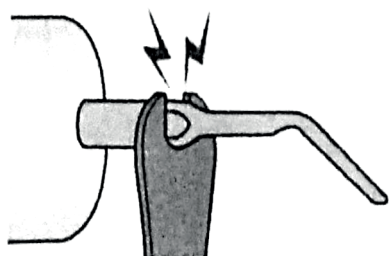


Preventivní opatření

Vyvarujte se příliš těsnému utažení, které by mohlo způsobit poškození.

Údržba



Nepoužívejte ředidla, benzen a rozpouštědla, chemikálie, nebo čisticí prášky.

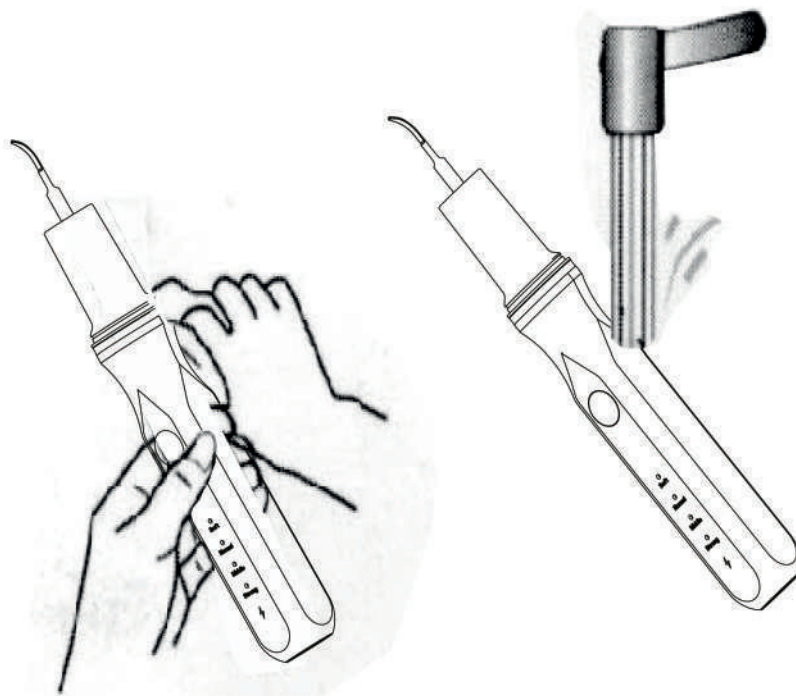

Tělo přístroje může být přímo omyté vodou a špínu lze otřít pomocí hadříku.

- Dezinfikujte pracovní hrot horkou vodou s vysokou teplotou před použitím.
- Abyste předešli křížové infekci, nesdílejte pracovní hrot
- Frekvence přístroje je různá, vyberte si prosím správný pracovní režim.
- Použijte pracovní hrot správně, jak je uvedeno výše.

Upozornění

Před použitím našich pomůcek se poraďte s licencovaným veterinářem.

Poskytujeme výrobek, nikoli léčebný plán a proto neneseme žádnou zodpovědnost za případné komplikace. Pokud se rozhodnete používat jej bez odborného dohledu, budete jej používat na vlastní nebezpečí. Když se na nás obrátíte a pokud vám dáme nějaké rady, neberte je jako samozřejmost, protože nejsme zodpovědní za to, že jsme vám poradili.

Tento výrobek není náhradou zdravotnického zařízení a nemá terapeutický účinek. Výrobek nepatří do rukou dětem do 18 let.